

# Invacare Rea® Dahlia® | Sclerosi Multipla allo stadio iniziale

Per gli utilizzatori affetti da Sclerosi Multipla saper gestire efficacemente le energie nel corso della giornata è di fondamentale importanza poiché le capacità funzionali variano considerevolmente nell'arco delle 24 ore. Per questo motivo l'utilizzo di un ausilio progettato per essere estremamente **versatile** può risultare l'alleato vincente per soddisfare le **mutevoli necessità** nel corso della giornata.

La carrozzina Rea Dahlia 30° di Invacare, con **seduta regolabile in altezza**, aiuta l'utilizzatore a **spingersi autonomamente con i piedi**. Per i primi 10° di basculamento, infatti, la parte frontale della seduta si alza di soli 20 mm, in modo da mantenere un'altezza ridotta da terra. Per favorire ulteriormente la **propulsione**, la carrozzina Dahlia consente anche di **regolare la posizione delle ruote posteriori**. Spostandole infatti in avanti, la carrozzina diventa più efficiente, per una guida ancor più facile e agevole per l'utilizzatore.

L'ingombro **compatto** di Dahlia 30° favorisce l'**accessibilità** e la **maneggevolezza** all'interno dell'ambiente domestico, in modo che l'utilizzatore possa comunque mantenere un buon grado di **indipendenza**. Tra le opzioni disponibili rientrano anche dei braccioli ridotti, ideali per gli spostamenti entro le mura di casa o per favorire la propulsione manuale.

La carrozzina Dahlia 30° è fornita di serie di un cuscino Flosshape per l'**integrità del tessuto cutaneo**, adatto per utilizzatori fino ad un massimo di 135 kg. La forma e la particolare sagomatura del cuscino favoriscono il sostegno e la stabilizzazione del bacino.

Dahlia 30°, nella versione con **auto-basculamento**, offre all'utilizzatore la possibilità di modificare in autonomia l'angolazione di basculamento e reclinazione. Questo aspetto si rivela assolutamente benefico sia per ridurre l'affaticamento muscolare, ma anche per **correggere la postura** ai primi segnali di debolezza o stanchezza.

Knowledge bank



I cambiamenti di posizione favoriscono la postura corretta dell'utilizzatore, ma non solo. Anche alcune funzionalità fondamentali come ad esempio quella respiratoria, cardiaca, dell'intestino e dell'apparato urinario possono trarne notevoli benefici.

Per un **posizionamento ottimale**, si consiglia di utilizzare l'innovativo schienale Matr<sup>x</sup>® TR di Invacare (basculamento/reclinazione). Matr<sup>x</sup> TR fornisce un valido supporto fino all'altezza delle spalle ed è stato progettato con uno speciale strato aggiuntivo in schiuma (soft foam) per un **maggior comfort** in posizione di massima reclinazione e basculamento. Su richiesta possono essere montati dei supporti laterali per **soddisfare particolari esigenze posturali**.

Le esigenze funzionali degli utilizzatori variano a seconda dello stato di avanzamento della malattia; proprio per questo motivo la carrozzina Dahlia 30° può essere **riconfigurata** di volta in volta, per soddisfare ogni tipo di necessità.

Invacare Mecc San S.r.l.  
Via die Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - Italia  
Tel: (+39) 0445 380059  
Fax: (+39) 0445 380034  
italia@invacare.com  
www.invacare.it

**rea**  
Confidence in posture solutions

**INVACARE**  
Yes, you can.®