

Invacare Rea® Dahlia® 45 | Sclerosi multipla allo stadio avanzato



Gli utilizzatori affetti da **Sclerosi Multipla** allo stadio più avanzato possono trarre enormi benefici dalle potenzialità offerte dalla carrozzina Rea Dahlia 45. Questo modello, infatti, è dotato di un angolo maggiore di basculamento e reclinazione, che si traduce in un **ottimo controllo posturale** e in una miglior distribuzione della **pressione corporea**.

La spasticità, correlata alla malattia, può infatti compromettere la corretta postura e la capacità di stare seduti, ma grazie all'opzione di basculamento e reclinazione, la posizione di bacino, tronco, testa e collo potrà essere maggiormente controllata e stabilizzata. E' infatti probabile che gli utenti affetti da sclerosi allo stadio più avanzato necessitino di un **maggior sostegno**, ma per molti pazienti questo si traduce in una posizione particolarmente scomoda e poco confortevole.

Lo schienale Flex 3 (a scocca rigida o tensionabile in base alle specifiche necessità) aiuta l'utilizzatore a raggiungere e mantenere una **postura perfettamente diritta**, ma offre soprattutto un **comfort eccezionale** se utilizzato in combinazione con i cuscini schienale Laguna o Mistral. Nel caso in cui si utilizzino le funzioni di basculamento e reclinazione, si **raccomanda sempre l'utilizzo anche di un poggiatesta** Invacare. Sono disponibili diversi modelli, in funzione delle esigenze posturali dell'utilizzatore.

Knowledge bank

Dahlia offre anche una gamma di poggiatesta, tra cui rientrano anche delle pedane a 90°. Queste offrono un miglior posizionamento delle gambe e dei piedi per tutti quei pazienti che, per effetto della spasticità, presentano una gamma di movimento limitato dei muscoli flessori ed estensori del ginocchio.

L'opzione di basculamento aiuta inoltre a **prevenire l'insorgenza di fenomeni di spasticità**, in quanto le anche, le ginocchia e le caviglie si trovano alla medesima angolazione. In fase di reclinazione, invece, il sistema Dual Stability System (DSS®) contribuisce ad **evitare frizioni e attriti**, per **preservare l'integrità del tessuto cutaneo**.

Su richiesta possono essere previsti degli accessori particolari (ad esempio il vassoio), per montare dispositivi di controllo ambientale o altri ausili di comunicazione. I vassoi, se richiesto, possono anche essere forniti di apposito cuscino, per favorire pazienti affetti da problemi di sensibilità cutanea, una complicanza abbastanza comune associata alla Sclerosi Multipla.



Rea Dahlia 45° è una carrozzina con un ampio ventaglio di **possibilità di configurazione**, per soddisfare di volta in volta le **diverse esigenze** dei suoi utilizzatori.

Invacare Mecc San S.r.l.
Via die Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - Italia
Tel: (+39) 0445 380059
Fax: (+39) 0445 380034
italia@invacare.com
www.invacare.it

rea
Confidence in posture solutions

INVACARE
Yes, you can.®