

LA SCELTA DEL SOLLEVATORE

La scelta del sollevatore non può prescindere da un'attenta valutazione di una serie di aspetti, tra cui i bisogni dell'utilizzatore, dell'azienda che fornisce il prodotto, della persona che opera sull'attrezzatura.

Tale valutazione deve sempre tenere conto del LIVELLO DI RISCHIO cui è sottoposto il paziente durante il trasferimento.

E' quindi importante valutare la scelta considerando non solo fattori tecnici o strutturali del dispositivo, ma anche le CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE in cui l'apparecchiatura sarà utilizzata e LE PERSONE che andranno ad operare sul sollevatore stesso.

E' inoltre fondamentale scegliere la CORRETTA IMBRACATURA, soprattutto in relazione alle condizioni dell'utilizzatore (sia esso paziente che assistente) e alle superfici che diventeranno parti integranti di tutte le fasi del trasferimento (letto, sedia a rotelle, poltrona, WC).

1. SOLLEVATORI A PAVIMENTO E A SOFFITTO

I sollevatori a pavimento e a soffitto sono anche chiamati SOLLEVATORI PASSIVI perché sono usati per trasferire una persona non autosufficiente da una superficie ad un'altra.

La scelta del sollevatore dipende dalle misure antropometriche, dalla corporatura, dalla misura e peso dell'utilizzatore e dall'ambiente.



Rispetto al sollevatore a soffitto, il sollevatore a pavimento è sicuramente il mezzo più comune di sollevamento. Aspetti importanti sono:

- 1. l'altezza di sollevamento del braccio**
- 2. l'ampiezza di apertura gambe: se manuale, tramite leva o pedale, oppure elettrica, con pulsantiera**
- 3. la rotazione del bilancino di 360°**
- 4. la forma del bilancino: a due o quattro punti**
- 5. la tipologia di movimento: manuale, a pompa tramite leva, oppure elettrica, con motore e pulsantiera a batteria**



Bilancino a 4 punte



Bilancino a 2 punte



Apertura della base a pedale

2. SOLLEVATORI A VERTICALIZZAZIONE



Un sollevatore a verticalizzazione è anche chiamato **SOLLEVATORE ATTIVO** perché è impiegato per assistere una persona in posizione semi verticale per i trasferimenti o per la riabilitazione alla deambulazione.

Garantisce un'assistenza sicura e confortevole sia per il paziente che per l'assistente (riduzione del rischio di lesioni in caso di caduta)

3 ACCESSORI

La scelta del corretto tipo di imbracatura dipende da molti aspetti, tra cui:

- **TIPOLOGIA SOLLEVAMENTO:** da quale posizione (da seduta a distesa e vice versa- da seduta a seduta - trasferimento dal pavimento)
- **COMFORT:** il paziente ha dolore cronico, collaborante, vengono utilizzate apparecchiature mediche (ventilatori, flebo,..)
- **SOLLEVATORE, LETTO, CARROZZINA, BILANCINO e MATERASSO:** da interfacciare al sollevatore




Devono essere sempre considerate le condizioni mediche del paziente, in particolare la capacità funzionale, la capacità di sedersi, il controllo del capo e del collo, la condizione della cute, il tono muscolare.

Per esempio, impiegare un'imbracatura che può essere rimossa mentre il paziente è seduto, aiuta a ridurre il rischio di accumulo di calore e permette una seduta più confortevole e dignitosa per il paziente a rischio di piaghe.

Il modello di imbracatura determina il tipo di trasferimento.

Numerosi sono i **TESSUTI**; per esempio un tessuto **COMPATTO**, a trama fitta, può incidere sul grado di scivolamento, uno in **RETE** sul livello di traspirazione e asciugatura, uno in materiale **TRIDIMENSIONALE** (tipo spacer), sul livello di protezione della cute e sul comfort.

Le taglie possono variare dalla misura piccola (Small) a taglie molto grandi (fino a Extra Large). Importante è verificare la compatibilità con la portata del sollevatore, oltre che con il peso del paziente. Per distinguere le misure, solitamente i bordi delle imbracature hanno colori diversi che corrispondono a determinate taglie.

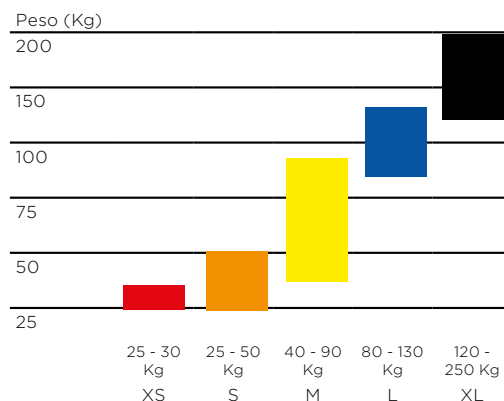

Attenzione! Questo documento fornisce dei suggerimenti e dei consigli generali. Non fa riferimento a casi o situazioni specifiche. Un operatore dovrebbe sempre cercare un consiglio appropriato e specifico da parte di un professionista adeguatamente qualificato prima di mettere in pratica i metodi di utilizzo indicati sopra. Nessun tipo di responsabilità sarà a carico di Invacare S.A.R.L.