


Manuale D'uso

Materasso Ventilato espanso

Modello	Materasso ventilato espanso	Mod. Ventilato Espanso 935670
Produttore	Invacare Mecc San	
Codice ISO	03.33.06.003	
Tipo di materasso	Materasso ventilato in poliuret. espanso Anti decubito	

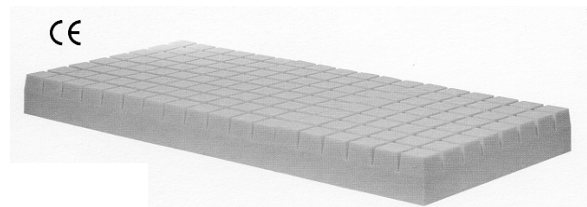

Caratteristiche		
Materasso		
	Struttura	Materasso in poliuretano espanso Formato da tre blocchi
	Caratteristiche	Poliuretano flessibile Heliocel Densità 30 Kg/mc
Dimensioni (cm)		
	Lunghezza	195
	Larghezza	90
	Altezza	14
Pesi (kg)		
	Peso materasso	6,3
	Portata max	100
Altro		
	Descrizione	Ignifugo classe 1 IM Autoestinguente ISO 3795



Manuale D'uso

Materasso Ventilato espanso

Complimenti per l'acquisto di un prodotto Invacare Mecc San I nostri prodotti sono progettati e fabbricati secondo le norme di qualità e di sicurezza più severe e sono conformi alle direttive europee (MDD 93/42/EEC). Sono garantiti un anno. Certi prodotti dispongono di una garanzia più importante ; consultare il vostro rivenditore.

E' di primaria importanza rispettare le istruzioni per l'uso e manutenzione seguenti :

Verificare che il prodotto vi è stato consegnato in perfetto stato prima di qualsiasi utilizzazione. In caso di dubbio riguardante le restrizioni di utilizzazione, la regolazione o la manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.

Non superare il peso massimo utilizzatore o il peso di carico massimo indicato in tabella. Fare sempre attenzione che il prodotto sia adatto ai vostri bisogni. In caso di dubbio, consultare un medico.

I pezzi usati, danneggiati o mancanti dovranno essere immediatamente sostituiti da un tecnico autorizzato.

Non lasciare o conservare il prodotto all'esterno.

Verificare periodicamente la stabilità e la rigidità del prodotto

Per delle ragioni igieniche, l'uso dei cuscini e materassi sarà riservato ad una sola persona.

La principale prevenzione delle piaghe da decubito consiste a cambiare i punti d'appoggio del corpo (il più spesso possibile per i cuscini, almeno ogni 3 ore per i materassi) allo scopo di limitare la compressione troppo prolungata dei vasi rispetto alle sporgenze ossee e per permettere l'irrigazione dei tessuti.

Il materasso mantiene inalterate le sue caratteristiche sopportando pesi non superiori a 100 Kg.

Pulitura

Pulire il materasso con un panno pulito e dell'acqua con sapone o altro detergente neutro, poi asciugare con un asciugamano a spugna assorbente.; non utilizzare dei solventi.

Conservare il materasso in un posto pulito ed asciutto.

PESO MASSIMO UTILIZZATORE: 100 kg